Кому: ООО «С.П. ГЕЛПИК»

117837, г. Москва, ул. Профсоюзная, 86, стр.2

тел.: (495) 334-13-92

## Уведомление о состоянии помещения для монтажа комплекса рентгеновского на 2 р.м. производства «С.П. Гелпик»

Ha	именование лечебного учреждения			
<b>A</b> ,	tpec			
Ф]	ИО и Телефон ответственного лица			
	Критерии оценки готовности помещения к монтажу оборуд	цоваі	кин	
1.	Есть возможность производить работы в выходные дни	ДА_	_Нет	
2.	Есть из процедурной в пультовое рентгенозащитное окно		ДА	
3.	В помещении выполнен демонтаж старого оборудования		ДА	
4.	Оборудование находится на месте монтажа		ДА	
5.	Обеспечивается свободный доступ в помещение для монтажа		ДА	
6.	В помещении закончены все работы по ремонту, помещение очищено от пыли и посторонних			
	предметов		ДА	
7.	Есть технологические отверстия (кабель-каналы) из пультовой в процедурную	ı	ДА	
8.	Есть готовый технологический проект размещения оборудования		ДА	
9.	Помещение для монтажа соответствует технологическому проекту		ДА	
10	. Есть акт проверки защитного заземления		ДА	
11	. Определено место для АРМ врача		ДА	
12	. Площадь процедурной не менее 24 м <sup>2</sup>		ДА	
13	. Пол процедурной рассчитан на вес более 500 кг		ДА	
14	. Есть распределительный щит и к нему подведено напряжение 3х380 В		ДА	
15	. Установлен выключатель нагрузки или рубильник, к нему подведено питание		ДА	
16	. Установлен автоматический выключатель в соответствии с тех.проектом		ДА	
17	. Есть рентгеновская защита процедурной по СанПиН 2.6.1.1192-03		ДА	
18	. Температура в процедурной и пультовой в пределах от 18°C до 25°C		ДА	
	В случае несоответствия кабинета указанному акту, повтор		ргтоэл	
	монтажной бригады проводится на платной основ		высэд	
	Соответствие данным критериям не отменяет необходимости соответствия пог СанПиН 2.6.1.1192-03 и другим, регламентирующим параметры рентгеновских документам.			
	/		20	
	(полнись) м п (ФИО)	лата		

Заполненное уведомление, а также проект и фото кабинета направить по адресу <a href="mailto:srv@helpic.ru">srv@helpic.ru</a>